

Potentielle risici

Problemet kan forhindre enheden i at analysere patientens tilstand eller levere behandlingen korrekt. **Indtil nu har der ikke været nogen indberetninger om uønskede hændelser.**

Påkrævede kundehandling:

1. Kontroller din Pad-Pak-beholdning for at finde ud af, om du har nogen af de berørte lotnumre angivet på side 1
 - a. Hvis der findes berørte Pad-Paks, skal du anmode om udskiftning ved at sende en e-mail til hjf@lotek.dk
2. I mellemtiden skal du fortsætte med at overvåge AED'en for at sikre, at statusindikatoren blinker grønt hvert 5. til 10. sekund. Kontakt straks Lotek, hvis du identificerer en af følgende situationer:
 - a. Hvis statusindikatoren blinker rødt, eller du hører et vedvarende bip.
 - b. Hvis der ikke er nogen statusindikator, der fungerer.
3. Når du modtager de nye Pad-Paks, skal du destruere de berørte Pad-Paks i henhold til lokale retningslinjer for bortskaffelse.